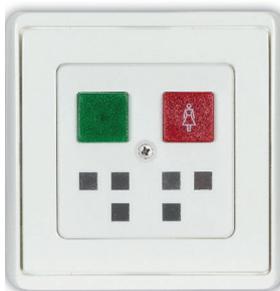


DATENBLATT

Kombitaster/Kombitaster mit Magnetsteckkontakt 

Der Kombitaster, auch Ruf-Absteltaster genannt, verfügt über zwei beleuchtete Tasten. Mit der roten Taste kann ein Bewohner einen Ruf auslösen. Die Rufauslösung wird mit einem Beruhigungslicht und einem akustischen Signal bestätigt. Beim Betreten des Zimmers meldet sich das Pflegepersonal durch Betätigen der grünen Taste anwesend und stellt die Rufe des Zimmers ab. Gleichzeitig wird die Rufnachsendung aus anderen Zimmern aktiviert.

Der Kombitaster ist auch als Variante mit zwei Magnetsteckkontakten lieferbar. Über die magnetischen Nebensteckkontakte können externe Auslöser, wie z. B. Handauslöser, Flächentaster oder Funkfinger etc., die über einen RMS Steckkontakt verfügen, angeschlossen werden. Ebenso ist es möglich, Alarm- oder Fehlerkontakte von medizinischen Geräten (z. B. Ernährungspumpe) anzuschließen. Das System erkennt dabei selbstständig, um welche Art von Auslöseeinheit es sich handelt. An den Taster angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des RMS-Steckers überprüft.

Der magnetische Steckerkontakt gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Auslöseelemente. Zum geraden Abziehen des Steckers ist eine relativ große Kraft erforderlich. Wird allerdings eine seitliche Kraft auf den Stecker ausgeübt, lässt sich dieser leicht vom Ruftaster lösen. Hierdurch wird eine Zerstörung des Steckers bzw. des Ruftasters durch eine Krafteinwirkung, z. B. aufgrund einer Kollision mit dem Bett, nahezu ausgeschlossen. Beim Entfernen des Steckers wird automatisch eine Steckerwurfmeldung an das Personal gesendet. Der Ruf kann über einen Absteltaster im Zimmer quittiert werden. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt ist, kann der entstehende Ruf über den Absteltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden. Pro Busmodul können bis zu 32 Zimmerbuskomponenten betrieben werden.

Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Findelicht/Beruhigungslicht
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Rufbestätigung durch Summer
- Zweidraht-Anbindung zum Modul
- Unterstützung für Steckerabwurf bei Version mit Magnetsteckkontakt
- UP / AP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung und Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem
- Optional mit Ansteuerung der Zimmerbeleuchtung

Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	UP oder AP
LED	in Tasten integriert
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer /	
Matchcode	KT KTMSK