

DATENBLATT



Multifunktions-Taster/ Multifunktions-Taster mit Magnetsteckkontakt **CE**

Der Multifunktions-Taster wird überwiegend im Zimmereingangsbereich eingesetzt und kann alternativ zum Kombitaster verwendet werden.

Beim Betreten des Zimmers meldet sich das Pflegepersonal durch Betätigen der grünen Taste anwesend und stellt die Rufe des Zimmers ab. Gleichzeitig wird die Rufnachsendung aus anderen Zimmern aktiviert.

Der Multifunktions-Taster ist auch als Variante mit zwei Magnetsteckkontakten lieferbar. Die gelbe Taste ist frei konfigurierbar, z. B. als Hilferuf oder Vitalmeldung. Jede Taste kann wahlweise auch mit unterschiedlichen Sonderrufen belegt werden. Wird die gelbe Taste als Vitalmeldung konfiguriert, beginnt diese zu den in der Vitalsoftware definierten Zeiten zu leuchten. Ab diesem Zeitpunkt muss sich der Bewohner innerhalb eines vorher festgelegten Zeitraumes „vital“ melden, indem er die gelbe Taste betätigt. Erfolgt dies nicht, wird automatisch ein Ruf an das Pflegepersonal ausgelöst.

Über die magnetischen Nebensteckkontakte können externe Auslöser, wie z. B. Handauslöser, Flächentaster oder Funkfinger etc., die über einen RMS Steckkontakt verfügen, angeschlossen werden. Ebenso ist es möglich, Alarm- oder Fehlerkontakte von medizinischen Geräten (z. B. Ernährungspumpe) anzuschließen. Das System erkennt dabei selbstständig, um welche Art von Auslöseeinheit es sich handelt. An den Taster angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des RMS-Steckers überprüft.

Der magnetische Steckerkontakt gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Auslöseelemente. Zum geraden Abziehen des Steckers ist eine relativ große Kraft erforderlich. Wird allerdings eine seitliche Kraft auf den Stecker ausgeübt, lässt sich dieser leicht vom Ruftaster lösen. Hierdurch wird eine Zerstörung des Steckers bzw. des Ruftasters durch eine Krafteinwirkung, z. B. aufgrund einer Kollision mit dem Bett, nahezu ausgeschlossen. Beim Entfernen des Steckers wird automatisch eine Steckerwurfmeldung an das Personal gesendet. Der Ruf kann über einen Abstelltaster im Zimmer quittiert werden. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt ist, kann der entstehende Ruf über den Abstelltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden. Pro Busmodul können bis zu 32 Zimmerbuskomponenten betrieben werden.

Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Rufbestätigung durch Summer
- Zweidraht-Anbindung zum Modul
- Unterstützung für Steckerabwurf bei Version mit Magnetsteckkontakt
- UP / AP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung und Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem
- Optional mit Ansteuerung der Zimmerbeleuchtung

DATENBLATT

Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	UP oder AP
LED	in Tasten integriert
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Artikelnummer / Matchcode	MT MTMSK