

Multifunktions-Zimmerdisplay

Das Multifunktions-Zimmerdisplay wird überwiegend im Zimmereingangsbe-
 reich eingesetzt. Über das Multifunktions-Zimmerdisplay können alle Informa-
 tionen der Rufanlage, wie z.B. anstehende Rufe, Not- und Sonderrufe,
 Störungen, Brandmeldungen aus der BMA usw. im Klartext angezeigt werden.
 Des Weiteren ist die Anzeige von Anwesenheitsmeldungen
 verschiedener oder auch nur der eigenen Gruppe auf dem Zimmerdisplay
 möglich. Bei mehreren Informationen wird automatisch durchgeblättert. Alle
 Meldungen werden über die gesamte Displaygröße dargestellt, sodass sie
 selbst aus einer Entfernung von 5 m deutlich zu sehen ist.

Ein Bewohnerruf wird mit der roten Taste ausgelöst. Die Rufauslösung wird
 mit einem Beruhigungslicht und einer akustischen Signalisierung bestätigt.
 Beim Betreten des Zimmers meldet sich das Pflegepersonal durch Betätigen
 der grünen Taste anwesend und stellt die Rufe des Zimmers ab. Gleichzeitig
 wird die Rufnachsendung aus anderen Zimmern aktiviert.
 Die gelbe bzw. weiße Taste ist freikonfigurierbar, z. B. als Hilferuf.
 Jede Taste kann wahlweise auch mit unterschiedlichen Sonderrufen belegt
 werden.

Stehen keine Rufe an und sind keine Anwesenheiten gesetzt, schaltet sich die
 Hintergrundbeleuchtung automatisch ab und die aktuelle Uhrzeit wird
 angezeigt.

Pro Busmodul kann 1 Zimmerdisplay angeschlossen werden.

Leistungsmerkmale

- Kontrastreiches LC-Display, hintergrundbeleuchtet (49 mm x 29 mm)
- Ausführliche Anzeige aller Rufereignisse im Klartext, z.B. Notruf mit
 Zimmer- und Rufstellenbezeichnung.
- Erkennung von verschiedenen Rufereignissen aus jedem Zimmer, z.B.
 Bewohnerruf, Anwesenheit, Hilfe-, Not-, Vital-, Technik-, Diagnostikruf.
- Bei jeder Verkabelung selektive Rufausgabe, z.B. Bett 1, Bett 2, Bad/WC
- Das Display ist mit dem Ruf-/Abstelltaster rot/grün und einer zusätzlichen
 Taste entweder in weiß oder in gelb ausgestattet
- Unterputz- oder Aufputzausführung
- Umschaltbar auf Anwesenheitsabfrage
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Ideal zur Sanierung bestehender Schwesternrufanlagen/Ruf-Leitsysteme
- Enthält Kleinrechner mit dialogfähiger Kommunikation
- Akustische Unterstützung der Rufnachsendung mit Signalisierung der
 jeweiligen Priorität des Rufes
- Rufbestätigung durch Summer

Technische Daten

Maße (HxBxT)	71,5 x 71,5 x 15 mm
Installationsart	uP oder aP
Umgebungstemperatur	0°C bis +60°C
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010 Sonderfarbe gegen Aufpreis möglich

Artikelnummer /	MZD-G (gelbe Taste)
Matchcode	MZD-W (weiße Taste)



wahlweise weiße oder
gelbe Funktionstaste



Winkel GmbH
 Kerkhagen 33
 58513 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51 / 929 66 – 0
 Telefax: 0 23 51 / 929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
 www.winkel-gmbh.de